




GESICHTSSCHUTZ- & HYGIENEVISIER *PRO*

transparent

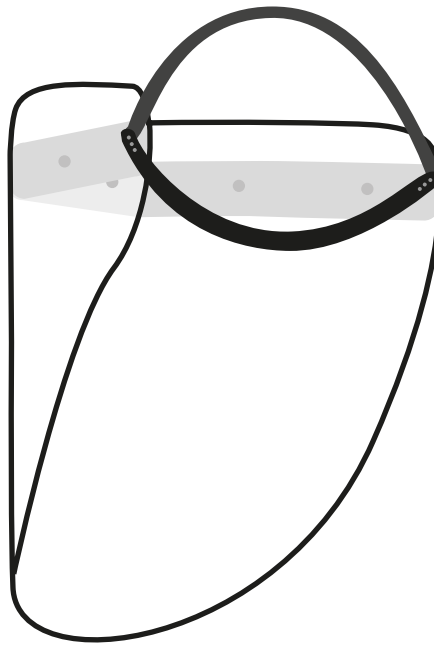

VERWENDUNG

Das Gesichts- & Hygienevisier von ServFaces bietet Ihnen zusätzlichen Schutz vor Infektionen, die durch Tröpfchen übertragen werden. Es schützt die Mund-, Augen- und Nasenschleimhäute vor Kontakt mit kontaminierten Händen oder Gegenständen.

Gesichtsschutz- & Hygienevisier PRO
SF-HK0015




4

260610

364282

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Ziehen Sie den Klebestreifen vom Schutzpolster ab und kleben Sie das Schutzpolster auf die Innenseite des Helmbügels
2. Bringen Sie dann das Schutzvisier auf dem Helmbügel an.
3. Befestigen Sie den Haltegurt »oben« am Helmbügel und passen Sie die Größe an.
4. Befestigen Sie den Haltegurt »hinten« am Helmbügel und passen Sie die Größe an.

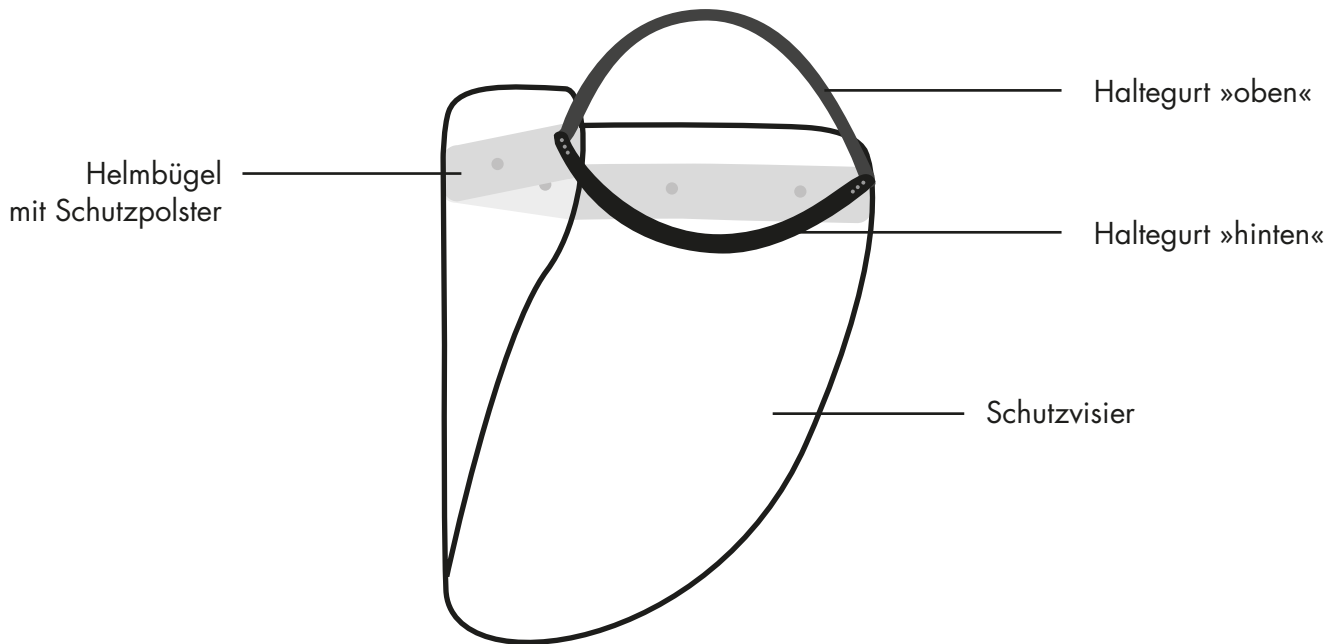

PFLEGEHINWEIS

Das Schutzvisier kann vom Helmbügel nach dem Gebrauch entfernt werden. Achten Sie beim Entfernen des Visiers darauf, die Innenseite nicht mit schmutzigen Händen zu berühren. Nachdem Sie Ihre Hände mit der Außenseite Ihres Helms in Kontakt gebracht haben, waschen Sie sie gründlich. Wir empfehlen die Elemente, mit Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis (z. B. hoch konzentrierter Isopropylalkohol) zu reinigen. Das Gesichts- & Hygienevisier kann mehrere Male verwendet werden.

Vorsicht geboten ist bei der Verwendung von Schwämmen, harten Tüchern oder Reinigungsmitteln mit Granulat. Diese können die glatte Oberfläche des Visiers trüben und seine Transparenz beeinträchtigen. Lesen Sie zur gründlichen Desinfektion von Helmkomponenten sorgfältig die Anweisungen der zuständigen medizinischen Dienste und verwenden Sie die von ihnen angegebenen Mittel. Vermeiden Sie Hitzeeinwirkung über 50 Grad Celsius auf das Maskenelement, da Verformungen möglich sind.